



ARBEITSPLATZ
VORBEREITEN



PATIENT
VORBEREITEN



UNTERSUCHUNG/
DIAGNOSE



PROPHYLAXE
SITZUNG



MOTIVATION &
RECALL



ARBEITSPLATZ
REINIGEN

**EINE MARKE FÜR DEN GESAMTEN
PROPHYLAXE-ARBEITSABLAUF**

Inhalt


Einführung	4
Prophylaxe-Arbeitsablauf mit Produkten von Kerr	10
Arbeitsplatz vorbereiten	12
Patient vorbereiten	16
Untersuchung und Diagnose	20
Prophylaxe-Sitzung	22
Motivation & Recall	38
Arbeitsplatz reinigen	40
Index	44

EINFÜHRUNG

Moderne Dentalhygiene hilft den Patienten durch eine Kombination aus Therapie und Prävention, ihre Mundgesundheit nachhaltig zu verbessern. Die im Prinzip kontinuierliche Tätigkeit eines Hygienikers besteht aus drei Grundkomponenten:

- 1. Vorbereiten von Arbeitsplatz und Patient**
- 2. Untersuchung & Prophylaxe-Behandlung**
- 3. Arbeitsplatz reinigen**

Dieser Prophylaxe-Arbeitsablauf bietet einen Überblick über die Produkte, die Kerr für präventive Behandlungen anbietet.

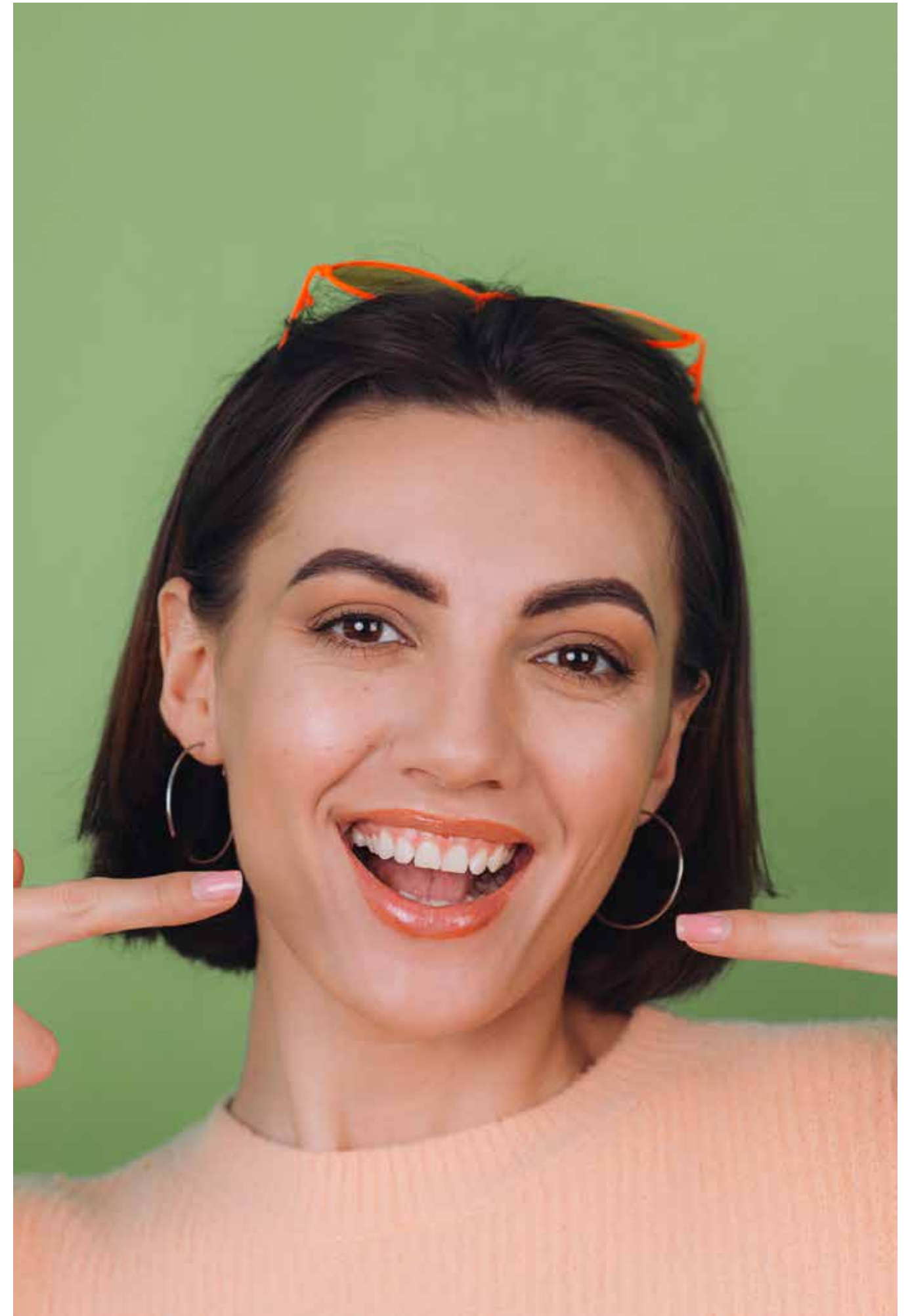

ORALE PROPHYLAXE

Orale Prophylaxe steht im Zentrum der Prävention, und der Bedarf daran wird mit der immer längeren Lebenserwartung des Menschen stetig zunehmen. Sehr wichtig ist sie auch bei der Implantatpflege.

Entscheidend für die Erkennung, Behandlung und Prävention oraler Erkrankungen ist ein professioneller Arbeitsablauf:



2.

Untersuchung & Prophylaxe-Behandlung

Befunderhebung, Parodontalbehandlung, Planung, Mundhygiene-Anleitung, Belagsentfernung, Reinigung und Politur.

1.



Vorbereiten von Arbeitsplatz und Patient

Anlegen von Schutzhüllen, Durchsicht der Patientenakten und Bereitstellung der Einmalprodukte und Instrumente für die einzelnen Patienten;

3.

Arbeitsplatz reinigen

Reinigung & Desinfektion des Arbeitsplatzes, fachgerechte Sterilisation und Abfallentsorgung.

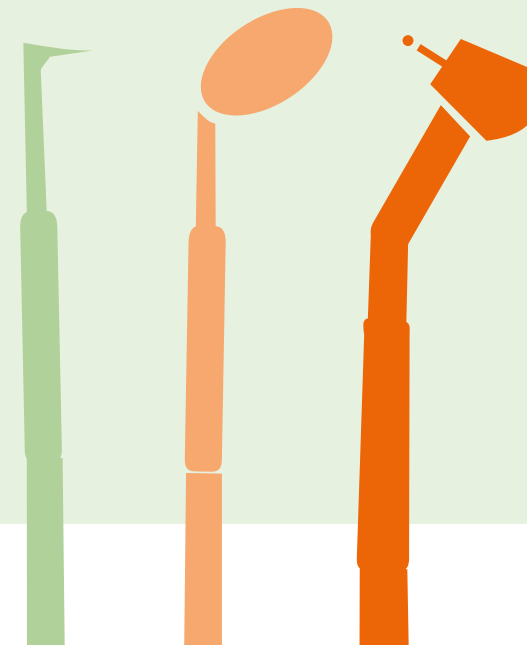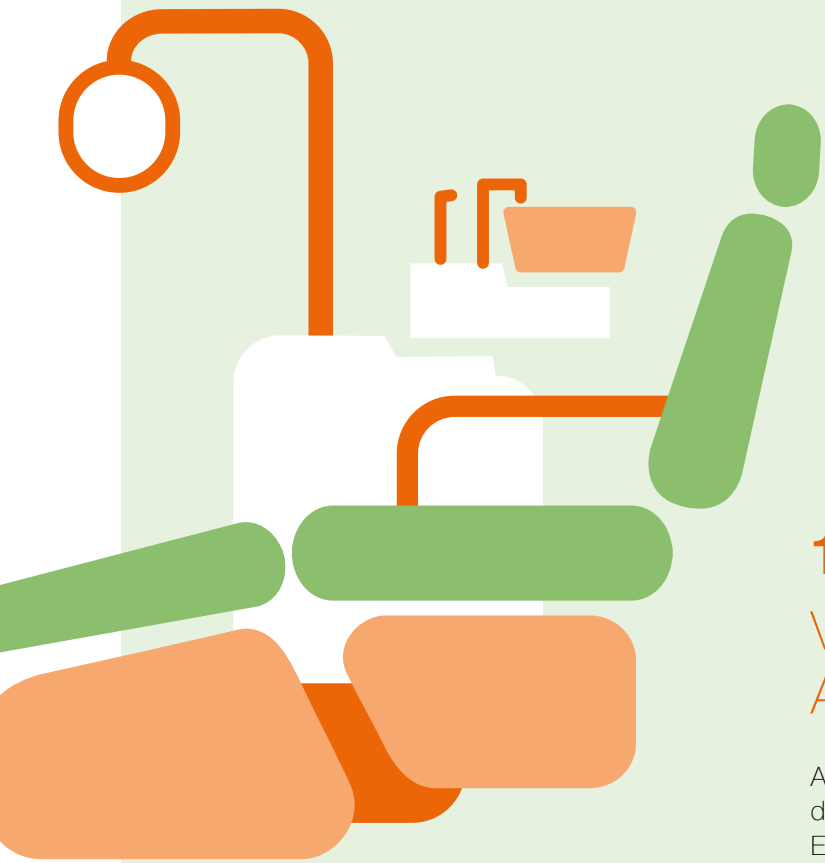

Zur Unterbrechung der „Infektionskette“ sind bei zahnmedizinischen Behandlungen praktikable und effektive Maßnahmen nötig.

Krankheitsübertragung erfordert eine Mikrobenquelle, eine spezielle Art von Kontakt und Übertragung, eine Eintrittsstelle und einen empfänglichen Wirtsorganismus.

Mikroben können durch Verletzungen, durch Kontakt mit nicht intakten Haut-, Schleimhaut- und Augengewebe oder durch Verschlucken in den Körper gelangen.

Gut strukturierte Maßnahmen zur Infektionskontrolle unterbrechen die „Infektionskette“ durch das Konzept der Reinigung vor der Desinfektion bzw. Sterilisation, minimieren die Infektionsgefahr für Patienten und Personal und erlauben einen effizienten Praxisbetrieb.

DIREKTE ÜBERTRAGUNG – PRIMÄRER KONTAKT

Verletzungen durch Nadeln und scharfe Gegenstände

Verletzungen durch Instrumente bei Behandlungen

In die Augen gelangende Sprühnebel oder Gewebspartikel

Bakterienbelastete Aerosole und Spritzer bei Behandlungen


Ungeschützte Haut

INDIREKTE ÜBERTRAGUNG – SEKUNDÄRER KONTAKT

Kontaminierte Instrumente

Kontaminierte Oberflächen und Geräte

Bakterienbelastete Aerosole

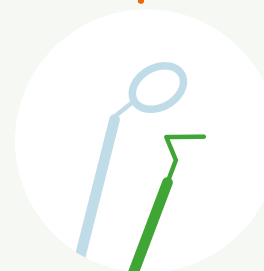

HANDHYGIENE

- » Handhygiene ist eindeutig die wichtigste Maßnahme zur Infektionskontrolle.
- » Mit Schaumseife aus dem Spender ist eine sehr gute Reinigung bei minimalem Verbrauch möglich, und die Infektionsgefahr wird effektiv reduziert.
- » Zunehmend sind auch alkoholbasierte Lösungen, Gels und Feuchttücher erhältlich.

SCHUTZAUSRÜSTUNG

- » Routinemäßiger Gebrauch von Schutzausrüstung, die den Kontakt von Pathogenen mit Augen-, Mund- und Nasenschleimhäuten oder Hautöffnungen verhindert, ist heute „Standard“.
- » Schutzhandschuhe, -schilde, -brillen und -masken schützen vor Kontakt mit potenziell infektiösen Flüssigkeiten und Gewebspartikeln, wie auch vor Verletzungen durch herumfliegende Splitter. Atemschutzmasken filtern zudem die eingeatmete Luft.

SCHUTZHÜLLEN

- » Schutzhüllen für den Behandlungsraum sollen verhindern, dass Oberflächen durch Berührung, sonstigen Kontakt oder Schadstoffe aus der Luft kontaminiert werden. Häufig berührte klinische Kontaktflächen (z. B. Griffe von Lampen) sowie komplexe und schwer oder zeitintensiv zu reinigende Oberflächen können mit einer undurchlässigen Einmalhülle abgedeckt werden.

INSTRUMENTENAUFBEREITUNG & OBERFLÄCHENDESINFEKTION

- » Die Aufbereitung muss dem Verwendungszweck des Instruments oder sonstigen Produkts angemessen sein.
- » Instrumente können mit enzymatischen Lösungen, Ultraschall, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten oder durch Abwaschen von Hand gereinigt werden.



Produkte zur Infektionskontrolle sollten je nach dem voraussichtlichen Grad der Kontamination und der Art der Behandlung gewählt werden.

Einmal- und Einmaldosis-Produkte werden in der Zahnmedizin immer beliebter. Sie stellen eine zeitsparende Alternative zu wiederverwendbaren Produkten mit arbeitsintensiver Aufbereitung dar und sollten die Gefahr von Kreuzkontaminationen ausschließen.



PROPHYLAXE-ARBEITSABLAUF MIT PRODUKTEN VON KERR



ARBEITSPLATZ VORBEREITEN

KEIMREDUKTION IM PATIENTENUMFELD DURCH SCHUTZHÜLLEN

Schutzhüllen können verhindern, dass klinische Kontaktflächen und Gegenstände bei Behandlungen kontaminiert werden. Vorteile u. a.:

- weniger Zeitbedarf für die Reinigung & Desinfektion im Patientenumfeld,
- verlässlicherer Schutz vor Kreuzkontamination,
- sichtbarer Schutz, der den Patienten ein Gefühl der Sicherheit gibt.

Mit Schutzhüllen sollten Flächen und/oder Gegenstände abgedeckt werden, die:

- bei Behandlungen häufig mit Handschuhen berührt werden,
- leicht mit Körperflüssigkeiten kontaminiert werden können,
- gegen flüssige Reinigungs- und Desinfektionsmittel empfindlich oder schwer zu reinigen sind.

Kerr TotalCare Pinnacle Schutzhüllen
sind für verschiedenste Oberflächen
im zahnärztlichen Behandlungsraum erhältlich



ARBEITSPLATZ
VORBEREITEN



PATIENT
VORBEREITEN



UNTERSUCHUNG/
DIAGNOSE



PROPHYLAXE
SITZUNG



MOTIVATION &
RECALL



ARBEITSPLATZ
REINIGEN

Trockene Luft bei Bedarf

Seal-Tight®


Unsere patentierte Technologie stellt den traditionellen Ansatz auf den Kopf, indem sie ein einzigartiges Verriegelungssystem verwendet, das jederzeit einen hochwertigen und optimalen Spritzenansatz für trockene Luft liefert. Einweg-Spritzenansätze mit integrierten Gummi-O-Ring-Dichtungen sorgen dafür, dass die Spritzen bei jedem Gebrauch wie neu funktionieren. Einfach auf den gelben Verschlussring drücken und den Ansatz entfernen und ersetzen.



Seal-Tight™

- » **Flexibel:** Erreicht auch schwierige Bereiche.
- » **Reduziert Servicegebühren:** Verringert den Verschleiß.
- » **Spart Zeit:** nie wieder Ansätze sterilisieren.
- » **Kreuzkontamination minimieren:** nach jedem Patienten entsorgen.
- » **Stabil:** ideal für die Wangenretraktion.
- » **Einfache Installation:** Jedes Mal ein frisches Siegel.

Seal-Tight™ SPECTRUM
In 7 verschiedenen Farben erhältlich

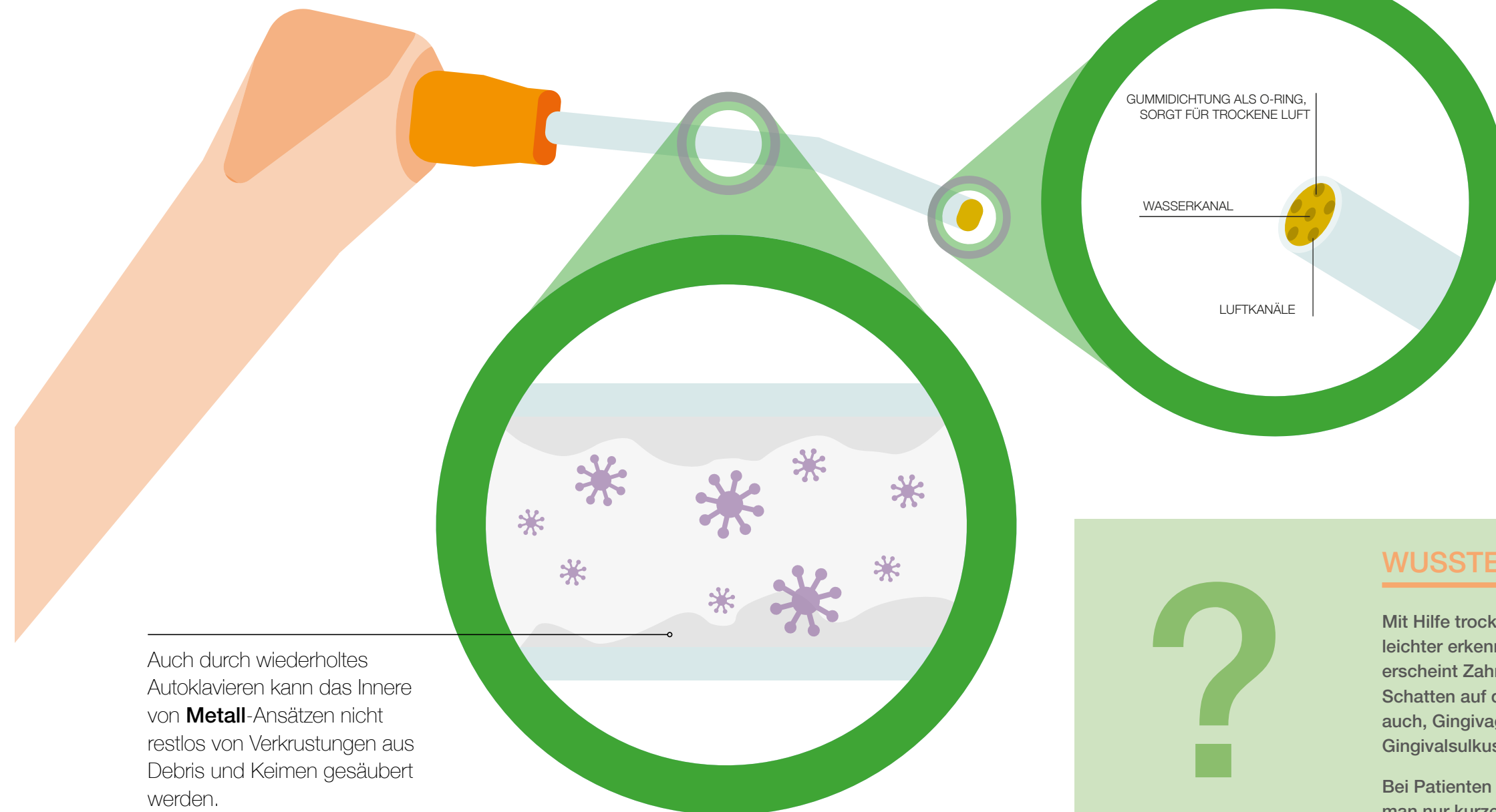

Auch durch wiederholtes Autoklavieren kann das Innere von **Metall**-Ansätzen nicht restlos von Verkrustungen aus Debris und Keimen gesäubert werden.



WUSSTEN SIE SCHON?

Mit Hilfe trockener Luft lässt sich supragingivaler Zahnstein leichter erkennen. Wenn die Zähne absolut trocken sind, erscheint Zahnstein weiß und kreibig, und im Spiegel als dunkler Schatten auf der Oberfläche des Zahns. Trockene Luft hilft auch, Gingivagewebe zu verschieben und so Konkreme im Gingivalsulkus zu entdecken.

Bei Patienten mit überempfindlichen Zähnen oder Karies sollte man nur kurze Stöße warmer Luft anwenden.

Eine Auswahl von SealTight-Adaptern ist auch von Kerr erhältlich: siehe S. 44.





PATIENT VORBEREITEN

VORBEREITUNG DES PATIENTEN

Eine korrekte Vorbereitung des Patienten trägt dazu bei, dass für alle Beteiligten das Umfeld sicher und die Behandlung komfortabel ist.

Wann immer indiziert, sollten Servietten, Lippen- und Wangenhalter und/oder sterile Einmalinstrumente benutzt werden. Einmalprodukte schließen aus, was ein Autoklav nicht ausschließen kann – Kreuzkontamination.



PATIENTENSERVETTE ANLEGEN Bib-Eze™

Nie wieder eine Trägerkette reinigen.

Mehrere Studien haben ergeben, dass herkömmliche Lätzchenhalter eine Kreuzkontaminationsgefahr von Patient zu Patient und von Patient zu Mitarbeiter darstellen.

Bib-Eze Lätzchenhalter sind leichte, dehnbare Einweg-Lätzchenhalter für die Zahnarztpraxis, die mit der schmutzigen Serviette weggeworfen werden können, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination reduziert wird, die von Standard-Lätzchenhaltern ausgeht.

- » Bib-Eze lässt sich komfortabler als standardmäßige dentale Serviettenhalter und -ketten verwenden, da es keine scharfen Kanten gibt und kein kaltes Metall am Hals des Patienten anliegt.
- » Sie sind dehnbar und lassen sich daher an alle Patienten anpassen.
- » Bib-Eze ist eine kostengünstige und benutzerfreundliche Lösung für jede Praxis. Mit seinen leicht abziehenden, selbstklebenden Enden kann Bib-Eze schnell angebracht, entfernt und weggeworfen werden – wodurch die Kosten für die Reinigung sowohl in Zeit als auch in Material entfallen. Ein einzelner Bib-Eze kostet weniger als ein Desinfektionstuch oder Sterilisationsbeutel.



Mundspüllösung

PlakACT™ mit Chlorhexidin - Ihr Verbündeter in Sachen Mundhygiene .

PlakACT eignet sich zur Verwendung zu Hause und in der Zahnarztpraxis, um die Bildung von Plaque zu verhindern.


- » **Flexibel:** Anwendung vor und nach zahnärztlichen Behandlungen, einschließlich parodontalen Eingriffen.
- » **Gebrauchsfertig:** muss nicht verdünnt werden.



WUSSTEN SIE SCHON?

Das IDZ empfiehlt unter anderem als zusätzliche Schutzmaßnahme beim Patienten eine orale Antisepsis durchzuführen.

<http://www.idz.institute>

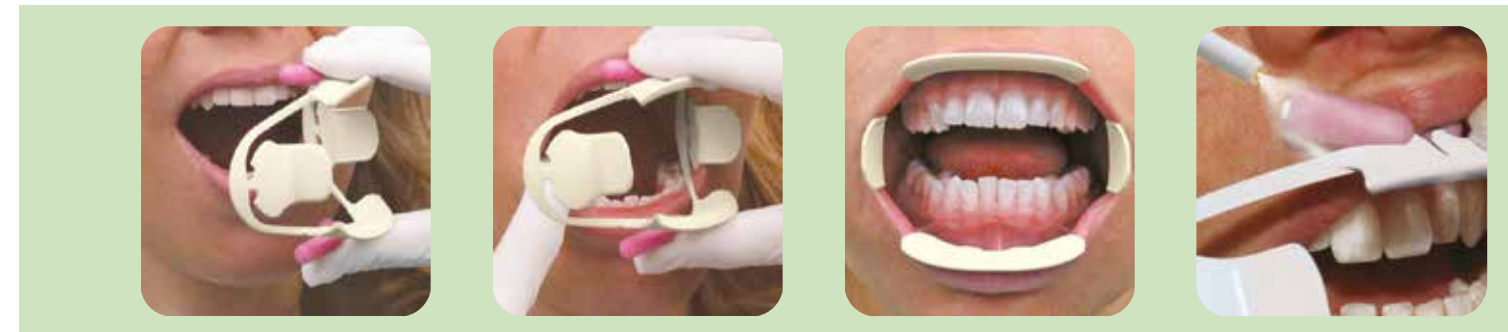

OptiView™

LIPPEN- UND WANGENHALTER ANLEGEN


Genießen Sie die freie Sicht.

OptiView ist ein Lippen- und Wangenretractor, der Lippen und Wangen zurückzieht, um gleichzeitig einen verbesserten bukkalen und gingivalen Zugang zu ermöglichen.

Dank seiner anatomischen Form minimiert OptiView Verspannungen und bietet dem Patienten auch bei längeren Zahnbehandlungen Komfort.

Doppelfunktion: ermöglicht sowohl Lippen- als auch Wangenretraktion mit einem Halter. Keine zusätzlichen Hände oder Instrumente erforderlich

Erhältlich in zwei Größen: Standard (weiß) und klein (hellblau)

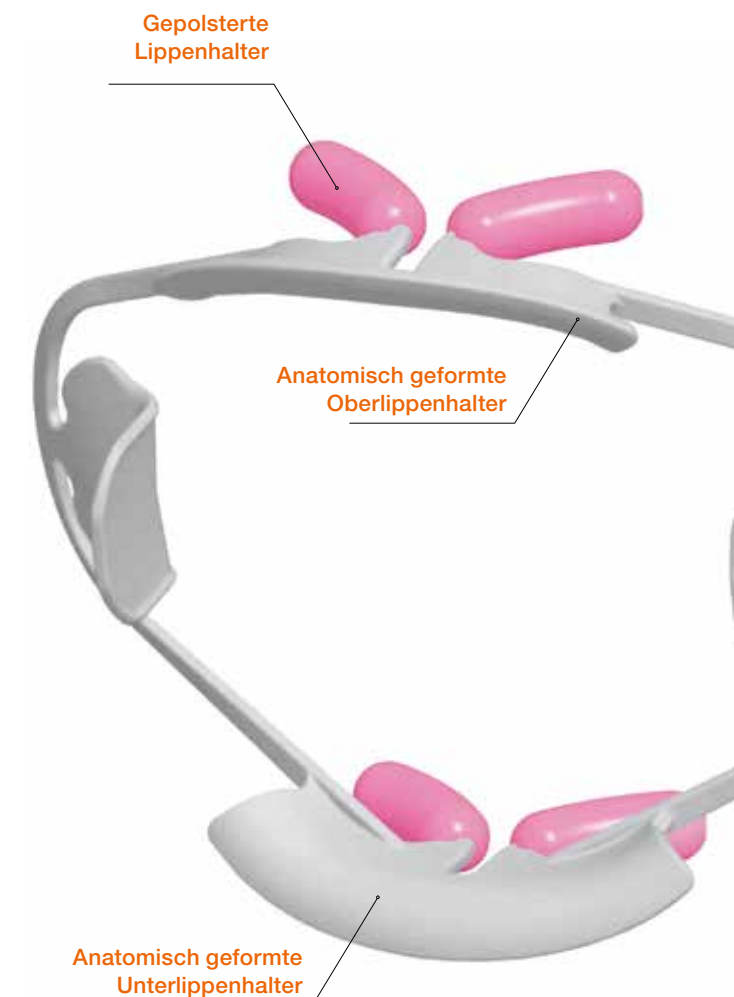



UNTERSUCHUNG/ DIAGNOSE

UNTERSUCHUNG UND RÖNTGEN

Nach der Voruntersuchung kann mittels Röntgenbild geprüft werden, ob Probleme vorliegen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind.



Intraorales Röntgen

Die optimale Diagnose mit der geringsten Belastung ermöglicht das mit allen gängigen Marken, Typen und Größen von Filmen, Speicherfolien und Sensoren – mit oder ohne Kabel – kompatible Röntgenhalter-Universalsystem von Kerr.

Basierend auf der Paralleltechnik erlauben diese Halter exzellente Vergleiche von über längere Zeit aufgenommenen Röntgenbildern (unabhängig davon, welche Person die Aufnahmen macht).

	Bissflügel	Anterior: Vorderzähne (Farbcode grün)	Posterior: Molaren und Prämolaren (Farbcode rot)
Röntgenhalter für Filme und Speicherfolien	Horizontale Bissflügel (Kwik) 	Periapikal 	Periapikal
	Vertikale Bissflügel (Paro) 	Endodontisch 	Endodontisch
Sensorhalter für direktes digitales Röntgen	Horizontal (Kwik) 	Periapikal 	Periapikal
	Vertikale Bissflügel (Paro) 	Endodontisch 	Endodontisch



PROPHYLAXE-SITZUNG

REINIGUNG UND POLITUR

Bei Reinigung und Politur werden mit Abrasivstoffen und mechanischen Hilfsmitteln äußere Verfärbungen (z. B. durch Tabak, Kaffee, Nahrung und Anti-Plaque-Mittel) beseitigt sowie saubere und glatte Oberflächen geschaffen.

Üblicherweise verwendet man ein normales Winkelstück mit Bürstchen oder Gummikelch (Cup).

Bimsstein ist der gängigste Abrasivstoff, doch es gibt auch Alternativen wie Perlit und Zirkoniumsilikat.

Abrasivstoffe können die Zähne schädigen, wenn nicht anschließend mit einer feinkörnigen Paste poliert wird. Bleiben die Zahnoberflächen im aufgerauten Zustand, so wird eine erneute Ablagerung von Plaque, Verfärbungen und Zahnstein begünstigt.

Genau aus diesem Grund entwickelte Kerr Cleanic eine Ein-Schritt- Prophylaxepaste, die sich dank integrierter variabler Abrasion innerhalb weniger Sekunden von einer Reinigungs- in eine Polierpaste verwandelt.

Konventionelle Technik mit zwei (oder mehr) Schritten



1. SCHRITT – REINIGUNG

CleanPolish ist eine angereicherte, bimssteinbasierte Paste zur schnellen und effizienten Reinigung von natürlichen Zähnen und metallischen Restaurationen.

RDA: 43,8 – REA: 5,5.



2. SCHRITT – POLITUR

Durch die Verwendung von SuperPolish als zweitem Schritt eines vollständigen Reinigungs- und Poliervfahrens werden sichtbare Ergebnisse erzielt, die selbst die anspruchsvollsten Patienten und Fachleute beeindrucken werden.

RDA: 9,8 – REA: 4,5.

Verwendung mit Pastenträgern:



Prophy Clips (autoklavierbar)



ARBEITSPLATZ
VORBEREITEN



PATIENT
VORBEREITEN



UNTERSUCHUNG/
DIAGNOSE



PROPHYLAXE
SITZUNG



MOTIVATION &
RECALL




ARBEITSPLATZ
REINIGEN

Cleanic™: Ein-Schritt-Propylaxepaste

Ein-Schritt-Technik mit Cleanic™

Dank der einzigartigen Perlit-Technologie mit integrierter variabler Abrasion verbindet Cleanic Reinigung und Politur in einem Schritt.

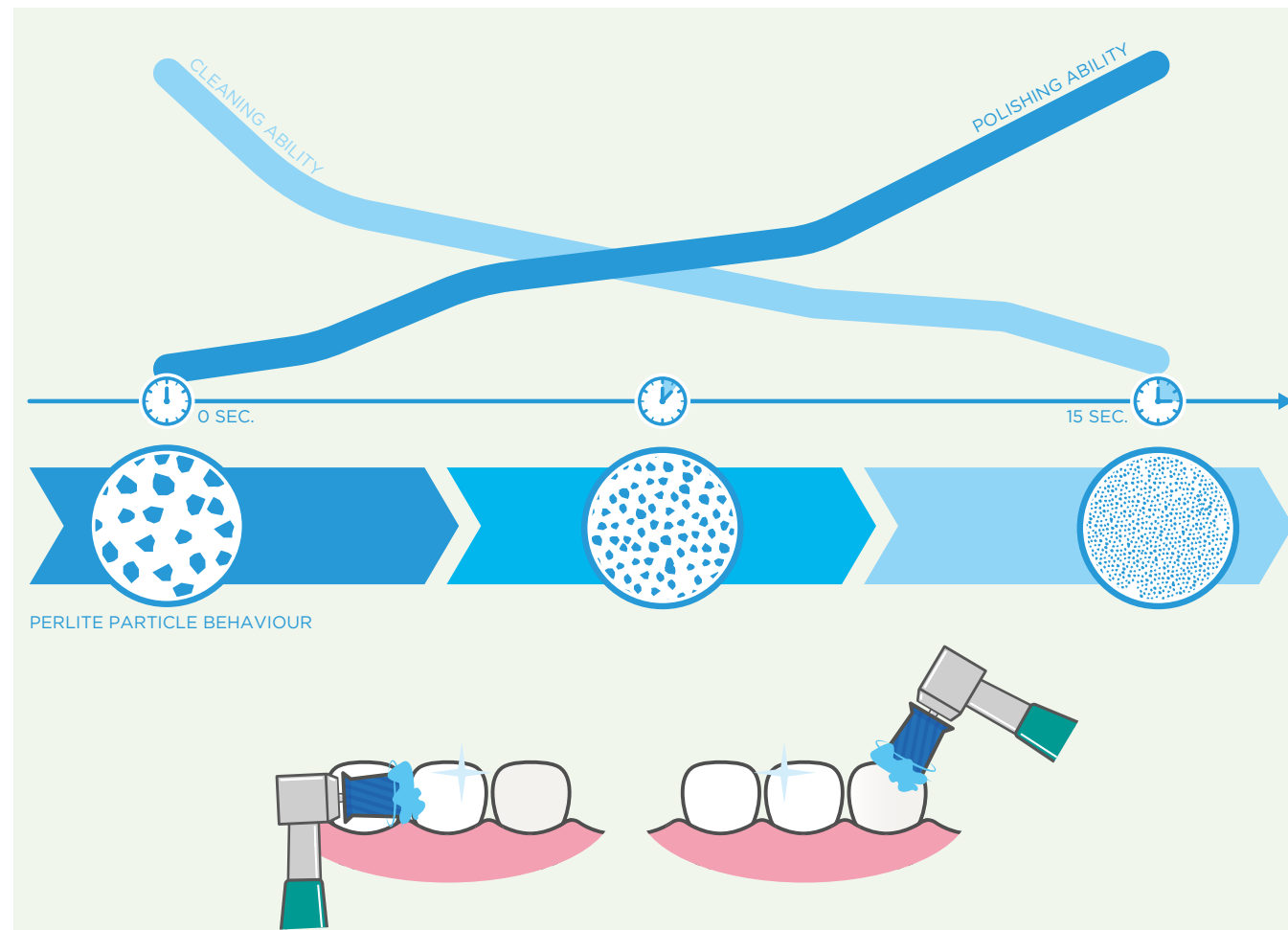

Die vulkanischen Perlit-Partikel (natürliches Siliziumoxid) passen ihre Abrasivität im Laufe Ihrer Behandlung an.

REINIGUNG

Beim ersten Auftragen von Cleanic auf den Zahn verhält es sich wie eine grobe Paste. Dabei hat Cleanic seine volle Reinigungskraft.

POLIEREN

Unter Belastung und innerhalb von Sekunden werden die abrasiven Partikel zerlegt und ihre schneidenden Kanten abgerundet und stumpfer. Jetzt setzt die Wirkung der Paste für die Hochglanzpolitur ein.



MINT MIT FLUORID


MINT LIGHT FLUORID

Ohne Aromastoffe und künstliche Farbstoffe

MINT FLUORIDFREI

GREEN APPLE MIT FLUORID OHNE MENTHOL


BERRY BURST MIT FLUORID

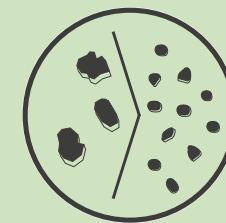

PATENTIERTE PERLIT-TECHNOLOGIE
Garantiert hervorragende Ergebnisse.



ALL IN ONE
Universelle 1-Schritt-Propylaxepaste.

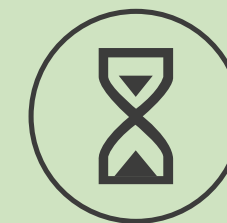

ZEITERSPARNIS
Von der Reinigung bis zur Politur in einem Schritt.



WISSENSCHAFTLICH BEWIESEN
Effektive Reinigungs- und Polierwirkung bei minimaler Abrasion der Zahnoberflächen.



ARBEITSPLATZ VORBEREITEN



PATIENT VORBEREITEN



UNTERSUCHUNG/ DIAGNOSE



PROPHYLAXE SITZUNG




MOTIVATION & RECALL



ARBEITSPLATZ REINIGEN

DIE VERWENDUNG VON CLEANIC

Tragen Sie die Cleanic-Paste nur auf eine begrenzte Anzahl von Zähnen (etwa 3 Zähne) mit einem Gummikelch auf (z. B. Pro-Cups), um in nur einem Schritt von der Reinigung zur Politur zu arbeiten. Anschließend applizieren Sie eine frische Portion Cleanic-Paste, um die nächste Gruppe von Zähnen zu behandeln.

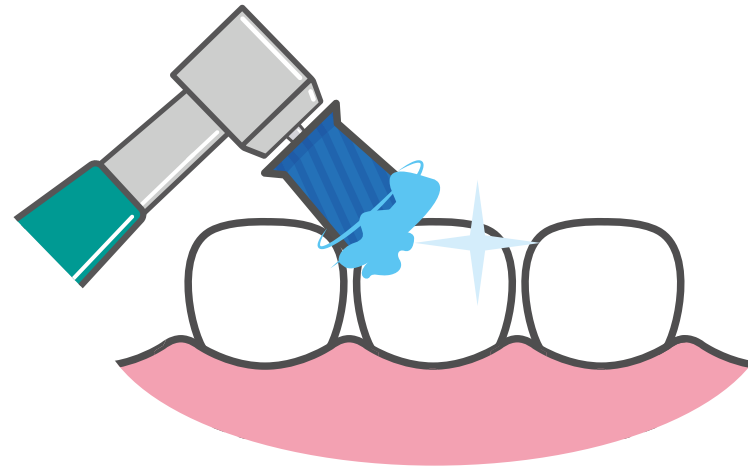

FÜR NORMALE BEZAHNUNG:

Arbeiten Sie von der inzisalen/okklusalen Oberfläche jedes Zahnes zur Gingivaregion; dies minimiert die Abrasion am Zahn.

FÜR FREILIEGENDE DENTIN- ODER WURZELOBERFLÄCHEN:

Beginnen Sie durch Applikation einer frischen Portion Paste auf die Schmelzoberfläche. Arbeiten Sie mit der gebrauchten Paste in Richtung freiliegende Wurzel- oder Dentinoberflächen (so ist sie weniger aggressiv).

Cleanic mit oder ohne Fluorid ist ebenfalls als Patrone mit 100g oder 200g erhältlich.



Verwendung mit Pastenträgern:



Prophy Clips (autoklavierbar)



Ausserdem zur Auswahl stehen die Cleanic Single Dosen, welche passgenau für die Ring Pots gefertigt sind.

Die Verwendung von Single Dosen in Verbindung mit den Einmalartikeln Ring Pots und Einweg-Prophy-Cups gewährleistet Ihnen die maximale Sicherheit im Hinblick auf Verhindern von Kreuzkontamination während der Prophylaxe-Sitzung.



Verwendung mit Pastenträgern:



Ring Pots (nicht autoklavierbar)
In 5 verschiedenen Farben erhältlich



ZUBEHÖR FÜR REINIGUNG UND POLITUR

Reinigung und Politur erfolgen mit einem langsam (unter 3000 U/min) laufenden Handstück, um die Hitzeentwicklung zu begrenzen.


Am Handstück ist ein Prophylaxe-Winkelstück befestigt, das einen geraden oder abgewinkelten Schaft haben und wiederverwendbar oder ein Einmalprodukt sein kann.

Man taucht den Gummikelch (Cup) in die abrasive Paste, hält ihn rotierend im 90°-Winkel gegen den Zahn und folgt dann vom Gingivarand aus der Form des Zahns.

Die Cups haben verschiedene Befestigungsmechanismen: Snap-On, Screw-Type oder Latch-Type.

Ein spitzer, konischer Cup aus weichem Gummi ist optimal für breite Interdentalräume.

Zur Zahnreinigung eignen sich auch rotierende Bürstchen aus Nylon, die innen einen Hohlraum zur Aufnahme der Paste und besseren Anpassung an den Zahn haben.

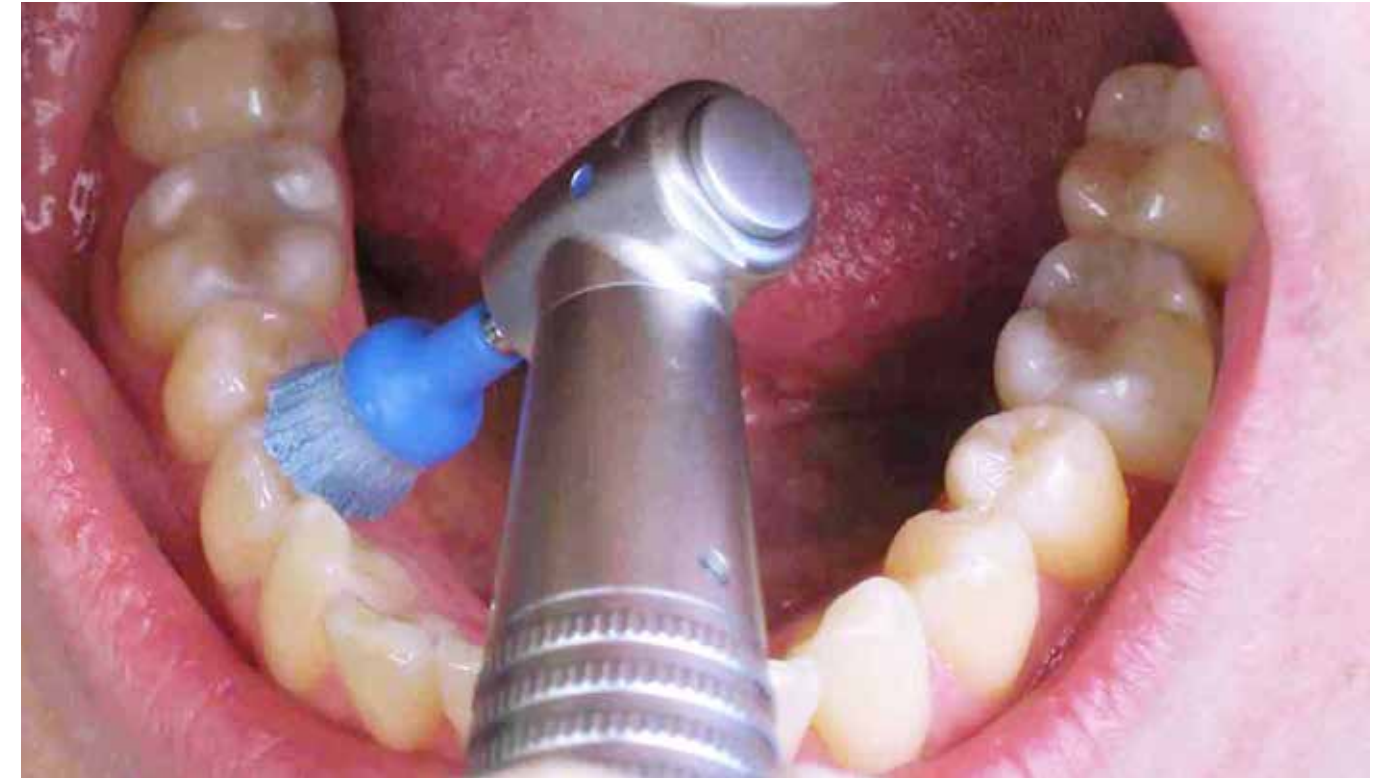


Miniatur-Bürstchen

Werden am Winkelstückkopf angebracht, mit Prophylaxepaste beschickt und zur Reinigung/Politur von natürlichen Zähnen wie auch Glasionomer-, Komposit- oder Metall-Restaurationen verwendet.

MINIATUR-BÜRSTCHEN



PRO-BRUSH

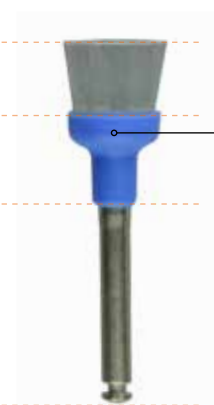

Kunststoffkopf: Der Bürstenkopf aus einem biokompatiblen Polymer verursacht **keine Kratzer oder sonstigen Schäden**, falls er bei Reinigung und Politur mit Nachbarzähnen in Kontakt kommt.



ARBEITSPLATZ
VORBEREITEN



PATIENT
VORBEREITEN



UNTERSUCHUNG/
DIAGNOSE



PROPHYLAXE
SITZUNG



MOTIVATION &
RECALL



ARBEITSPLATZ
REINIGEN

FARBIGE PROPHY-CUPS

Kerr bietet auch ein komplettes Sortiment von Prophy Cups

	PRODUKT-BESCHREIBUNG	CUP DESIGN	PRODUKTHIGHLIGHTS
Screw-Modelle	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, gerippt Türkis		Dank ihrer innen gerippten Konstruktionsweise können sich die Cups der Zahnkontur anpassen und ihr folgen. Dies sorgt für maximalen Oberflächenkontakt und höchste Reinigungswirkung.
	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, lamellenförmig Hellgrau		Die meistverkauften PROPHY CUPS: die Konstruktion mit vier Stegen sorgt für eine verbesserte Beseitigung von Flecken und Biofilm für eine schnelle, wirkungsvolle Reinigung. Das Instrument der Wahl zum Polieren am Gingivarand und in den bukkalen, lingualen und interproximalen Bereichen. Für alle Patienten.
	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Hartes Gummi, lamellenförmig Dunkelgrau		
	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, spitz Türkis		Das flexible, spitz zulaufende Arbeitsende erlaubt einen besseren Zugang zu engen und interproximalen Bereichen, wie Implantate, Kronen, Brücken, Zahnzwischenräume, Brackets, sowie unter kieferorthopädische Drähte. Damit ist sie für Implantatnachsorge sowie Kieferorthopädie und Parodontologiepatienten ideal geeignet. Hervorragend für die Fleckentfernung.
	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, spiralförmig Violett (NEUES DESIGN)		Neues Design - Spiral Cups - Reduziert mit seiner turbinenförmigen inneren Blade-Geometrie effektiv ein Verspritzen und verfügt über äußere Kreuzspiralkämme zur verbesserten interproximalen Reinigung.
	Aufschraubbare Dorne		Zur Verwendung von Screw-type Bürsten und Cups in Winkelstücken mit Standard-Schaft.
Verbundene Modell (Latch-Type)	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch (Winkelstückschaft) - Weiches Gummi, lamellenförmig Hellgrün		"Die meistverkauften PROPHY CUPS: die Konstruktion mit vier Stegen sorgt für eine verbesserte Beseitigung von Flecken und Biofilm für eine schnelle, wirkungsvolle Reinigung. Das Instrument der Wahl zum Polieren am Gingivarand und in den bukkalen, lingualen und interproximalen Bereichen. Für alle Patienten."
	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch (Winkelstückschaft) - Hartes Gummi, lamellenförmig Waldgrün		
	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch (Winkelstückschaft) - Weiches Gummi, lamellenförmig Pink		Dank ihrer innen gerippten Konstruktionsweise können sich die Cups der Zahnkontur anpassen und ihr folgen. Dies sorgt für maximalen Oberflächenkontakt und höchste Reinigungswirkung.
	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch (Winkelstückschaft) - Hartes Gummi, gerippt Magenta		
	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch (Winkelstückschaft) mit Nylonborsten - Hartes Gummi Weiß		Dank seiner innenliegenden Borsten, welche länger als der Cup sind, wirkt es effektiv in den interproximalen Bereichen, in denen Standard Cups an ihre Grenzen kommen. Besonders effektiv bei starken Verfärbungen.
Snap-on Modelle	EINWEG-PROPHY CUPS - Snap On - Weiches Gummi, lamellenförmig. Ocker		Das Sechs-Lamellen-Design ermöglicht einen kontinuierlichen Druck und Kontakt auf die Zahnoberfläche für eine maximale Reinigungsleistung.
	EINWEG-PROPHY CUPS - Snap On - Hartes Gummi, lamellenförmig. Orange		
	Aufsteckdorne Snap-on		Zur Verwendung von Snap-on Bürsten und Cups in Winkelstücken mit Standard-Schaft.




PRO-CUPS

Pro-Cup Gummikelche erlauben eine spritzfreie Pastenapplikation. Das feine Lamellenprofil auf der Außenfläche transportiert die Paste zum Rand des Cups und verhindert so Materialspritzen.

Die hellblauen Cups aus weichem Gummi sind optimal für Patienten mit entzündeter Gingiva, die dunkelblauen aus härterem Gummi können bei Patienten mit gesunder Gingiva angewandt werden.

Mit den kürzeren Cups (Junior) sind die bukkalen Flächen von Molaren leichter erreichbar. Latexfrei.

Dank der einzigartigen feinen Lippe am Rand sind Reinigung und Politur nahe und unter der Gingiva exzellent kontrollierbar.

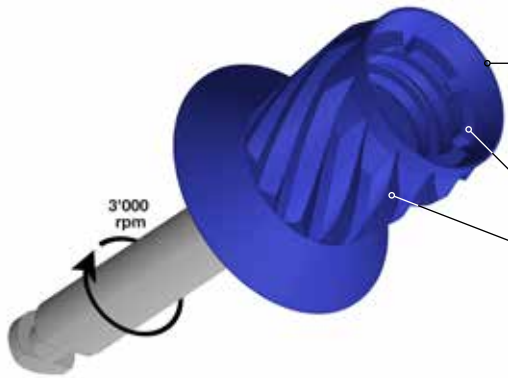

Mit dem einzigartigen inneren und äußeren Lamellenprofil befördert Pro-Cup Prophylaxepaste und Speichel spiralförmig zum Kelchrand. So spritzt es nicht.

IMPLANTATE IM FOKUS

Professionelle Implantatpflege und sorgfältige Mundhygiene sind für ein entzündungsfreies Zahnfleisch und damit für gute Langzeitresultate unabdingbar.

Periimplantitis ist eine ortsspezifische infektiöse Erkrankung, die rund um ein enossales Implantat in Funktion Weichgewebsentzündungen und Knochenabbau verursacht.

In der Mundhöhle wird die Implantatoberfläche rasch mit einer Proteinschicht – der sog. Speichelpellikel – überzogen und von oralen Mikroorganismen besiedelt, so dass ein mikrobieller Biofilm entsteht.

Implantate sollten mit Instrumenten gereinigt werden, die weicher als Titan sind, z. B. Gummikelche und Polierpaste, Zahnseide, Interdental-Bürstchen oder Kunststoff-Scaler. Damit wird die Oberfläche nachweislich nicht aufgeraut, im Gegensatz zu Metall- und Ultraschall-Scalern.

Belagsentfernung und Wurzelglättung

Bei der Instrumentenwahl für die professionelle Pflege von implantatgestütztem Zahnersatz sollte man nicht nur auf die Anwenderfreundlichkeit des Instruments achten, sondern auch auf die Schäden, die es dem Titan-Abutment langfristig zufügen kann. Wegen der Weichheit von handelsüblichem Reintitan wurden für die Reinigung von Implantat-Abutments Alternativen zu den konventionellen Edstahlinstrumenten entwickelt, die die Oberfläche nicht aufrauen.

Implant Deplaquers

- » Zur kratzfreien Entfernung weicher Beläge von und rund um Implantatoberflächen
- » **Spezielle Form** ermöglicht die Reinigung von Implantaten von allen Seiten
- » **Metallfrei:** kein Verkratzen der Implantatoberflächen (Produkt aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff)
- » Autoklavierbar bei 134 °C



UNIVERSAL

Zum lokalen Gebrauch auf allen Flächen



Reinigung und Politur von Implantaten


Als idealer Abschluss der Implantatpflege empfiehlt sich eine schonende Reinigung und Politur mit einer Spezialpaste für Implantate.

Dafür hat Kerr die Implant Paste entwickelt, optimal anwendbar mit unseren diversen Cups und Bürstchen (Latch- und Screw-Type, mit Mandrells als Adapter für Screw-Type-Produkte bei Latch-Type-Handstücken).

- » **Implant Paste** entwickelt für eine effiziente und schonende Pflege von Implantaten.!
- » Dank ihres niedrigen RDA-Werts von 9,8 (REA 4,5) verkratzt Implant Paste die Implantatoberfläche nicht!
- » Implant Paste basiert auf **Aluminiumoxid**, enthält **kein Fluorid** (eine Paste für Implantate sollte fluoridfrei sein, da es sinnlos ist, Fluorid an Stellen zu applizieren, wo es nicht absorbiert werden kann) und hat einen angenehm frischen Minzgeschmack.



Taschenspülung

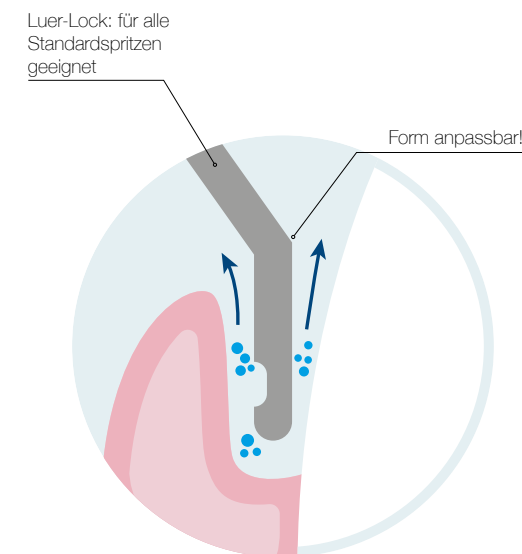

Für die Spülung von Zahnfleischtaschen oder die Applikation von Pasten eignen sich sterile Nadeln mit abgerundetem Ende und seitlicher Öffnung, z. B. **Kerr Irrigation Probe**.



Die Kerr Irrigation Probes sind Spülnadeln mit seitlicher Öffnung und abgerundetem Ende, entwickelt für fachgerechte und sanfte Spülungen von Wurzelkanälen, Wunden und parodontalen Taschen ohne Gefahr einer Gewebeschädigung.



Sie eignen sich auch für die Spülung während parodontaler Eingriffe, zur interdentalen Spülung nach Zahnsteinentfernung und Politur mit Gummikelchen sowie für die Platzierung von Medikamenten (Lösungen oder Pasten) in parodontalen Taschen. Im Allgemeinen werden sie in Verbindung mit einer Handspritze und Spüllösung verwendet.

Der Luer-Lock Anschluss ist passend für alle standardisierten Spritzen. Die Spülnadeln können nach Bedarf geformt werden und sind in 4 Größen erhältlich.

NACH DER PROPHYLAXE-SITZUNG VERBLEIBEN DER HYGIENIKERIN UNTER ANDEREM DIE FOLGENDEN AUFGABEN:



ERSTELLUNG UND AKTUALISIERUNG DER PATIENTENAKTEN.

Präzise geführte Patientenakten erlauben Vergleiche der bei den einzelnen Nachsorgeterminen gesammelten klinischen Daten mit denen aus früheren Untersuchungen.



PLANUNG DER NACHSORGE.

Regelmäßige Nachsorge ist bei Patienten mit parodontalen Erkrankungen besonders wichtig. Empfohlene Terminierung der Nachsorge:

- » Gesundes Parodontium
– Termin nach 8–12 Monaten
- » Gingivitis – Termin nach 6 Monaten
- » Leichte/mäßige Parodontitis
– Termin nach 3–4 Monaten
- » Schwere Parodontitis
– Termin nach 2 Monaten

DEMONSTRATION GUTER MUNDHYGIENE-TECHNIKEN ZUR ENTFERNUNG OBERFLÄCHLICHER PLAQUE.

Den Patienten über die korrekten Techniken zur häuslichen Mundhygiene informieren, ihn diese Techniken selbst ausführen lassen, damit sie besser im Gedächtnis bleiben, die Botschaft verstärken und ein positives Feedback bieten – dies kann die Entwicklung guter Gewohnheiten fördern.

EMPFEHLUNG VON PRODUKTEN FÜR DIE HÄUSLICHE MUNDHYGIENE.





MOTIVATION & RECALL

MOTIVATION IST ENTSCHEIDEND FÜR DIE GESUNDERHALTUNG

Die Patienten sollten durch Aufklärung über ihre Mundgesundheit zur erfolgreichen häuslichen Zahnpflege motiviert werden.

Wird erklärt, welche Ursache das Problem hat, was der Hygieniker dagegen tut und wie sich ein erneutes Auftreten verhindern lässt, so können kognitive und emotionale Reaktionen folgen, die dazu führen, dass der Patient zu Hause mehr auf seine Mundhygiene achtet.

Es können Zahnpasten mitgegeben oder empfohlen werden, um Resultate professioneller Behandlungen zu erhalten. Auch Zahnseide/-stocher oder Interdental-Bürstchen sollten bei der erhaltenden oder korrektiven Therapie benutzt werden. Produkte auf Chlorhexidin-Basis können verschrieben werden, falls nach einer professionellen Reinigung eine antiseptische Therapie nötig ist.

Zahnpasta im Erhaltungsprogramm

Cleanicident mit **Perlit** ist eine Spezial-Zahnreinigungspaste zur hocheffektiven **häuslichen Anwendung** gegen hartnäckige Verfärbungen und Plaque.

Dank der enthaltenen Perlit-Partikel bietet Cleanicident eine integrierte variable Abrasion in Verbindung mit einer maximalen Reinigungswirkung gegen Plaque und die häufig durch Tabak, Tee, Kaffee und Rotwein verursachten Verfärbungen.

Der Patient sollte Cleanicident 2- bis 3-mal pro Woche anstelle der normalen Zahnpasta verwenden.



PlakACT™ mit Chlorhexidin - Ihr Verbündeter in Sachen Mundhygiene.

PlakACT eignet sich zur Verwendung zu Hause und in der Zahnarztpraxis, um die Bildung von Plaque zu verhindern. Es wirkt als Mundspülung für die normale Hygiene-Routine, Mundspray für die gezielte Anwendung oder Gel für eine längere Haftung genau dort, wo Sie es wünschen, und mit der gewünschten Intensität.

- » **Flexibel:** Anwendung vor und nach zahnärztlichen Behandlungen, einschließlich parodontalen Eingriffen.
- » **Gebrauchsfertig:** muss nicht verdünnt werden.



ARBEITSPLATZ
VORBEREITEN



PATIENT
VORBEREITEN



UNTERSUCHUNG/
DIAGNOSE



PROPHYLAXE
SITZUNG



MOTIVATION &
RECALL



ARBEITSPLATZ
REINIGEN



ARBEITSPLATZ REINIGEN

REINIGUNG UND DESINFEKTION VON OBERFLÄCHEN

Low-Level-Desinfektionsmittel töten die Testmikroorganismen *Salmonella*, *Staphylococcus aureus* und *Pseudomonas aeruginosa*. Man benutzt sie auf Flächen nicht invasiver medizinischer Geräte, die nicht sichtbar mit Körperflüssigkeiten verschmutzt sind.

Intermediate-Level-Desinfektionsmittel töten dieselben Testmikroorganismen und sind zudem tuberkulozid. Sie eignen sich zur Reinigung von Flächen mit oder ohne sichtbare Verunreinigung durch Blut oder andere Körperflüssigkeiten.

Für eine fachgerechte Anwendung dieser Produkte sind die Anleitungen der Hersteller unbedingt zu beachten.

CaviCide™:

2-in-1-Reinigungs- und Desinfektionsmittel

CaviCide ist ein praktisches, gebrauchsfertiges Breitband-Oberflächendesinfektionsmittel für medizinische Geräte und Instrumente, das Viren und Bakterien, wie etwa TB, HBV, HCV, HIV, MRSA und VRE, sowie Pilze wirksam bekämpft.

Erhältlich als Spray, Flüssigkeit und Feuchttuch.

Die Produktfamilie CaviWipes & CaviCide bietet Zeitersparnis, praktische Verpackung, Benutzerfreundlichkeit und Desinfektion auf mittlerem Niveau in verschiedenen Größen.

CaviWipes und CaviCide sind Desinfektionsmittel, die schnell, einfach anzuwenden und zeitsparend sind. Sie werden für die Verwendung auf harten, nicht porösen Oberflächen nicht-invasiver medizinischer Geräte empfohlen.

- » Desinfektionsspray
- » Desinfizierende Tauchlösung für nicht-invasive medizinische Instrumente
- » Gebrauchsfertig: keine Verdünnung erforderlich
- » CaviWipes sind gebrauchsfertige Einweg-Desinfektionstücher, die mit CaviCide vorgetränkt sind

Einwirkzeit: 3 Minuten oder weniger*

Alkoholgehalt: 17,2 % IPA



*Bitte Angaben auf dem Etikett zu den korrekten Einwirkzeiten beachten.



ARBEITSPLATZ
VORBEREITEN



PATIENT
VORBEREITEN



UNTERSUCHUNG/
DIAGNOSE



PROPHYLAXE
SITZUNG



MOTIVATION &
RECALL



ARBEITSPLATZ
REINIGEN



Reinigung und Desinfektion von Oberflächen nicht-invasiver medizinischer Geräte **mit Spray**

REINIGUNG VOR DESINFEKTION		DESINFEKTION NACH REINIGUNG	
1. CaviCide direkt auf die zu reinigende Fläche sprühen.	2. Mit sauberem Papiertuch Debris und Keime abwischen. Das Tuch nach Gebrauch entsorgen.	3. CaviCide direkt auf die vorgereinigte Fläche sprühen und diese gründlich benetzen. Für maximale Desinfektion drei Minuten* einwirken lassen.	4. Mit sauberem Papiertuch abwischen. Das Tuch nach Gebrauch entsorgen.
			

* Bitte Angaben auf dem Etikett zu den korrekten Einwirkzeiten beachten.

¹ EN14476 tested using MVA (Modified vaccinia virus Ankara) as a surrogate representing enveloped virus

² ASTM E1053-20



Reinigung und Desinfektion von Oberflächen nicht-invasiver medizinischer Geräte **mit Tüchern**

Mit einem leicht zu öffnenden Klappdeckel in der Dose oder als Flat Pack, verpackt in praktischen, gebrauchsfertigen Behältern.

REINIGUNG VOR DESINFEKTION		DESINFEKTION NACH REINIGUNG
1. Ein erstes CaviWipes-Tuch entfalten.	2. Fläche oder Gegenstand mit dem Tuch abwischen, um Debris und Keime zu entfernen. Das Tuch nach Gebrauch entsorgen.	3. Die vorgereinigte Fläche durch Abwischen mit einem zweiten CaviWipes-Tuch desinfizieren.
		



INDEX - BESTELLNUMMERN

ARBEITSPLATZ VORBEREITEN			
REF	PRODUKTBESCHREIBUNG	INHALT	SEITE
3800	Stuhlbezug	69,9 cm x 61 cm, Packung zu 225 Stück	13
3700/C	Cover-All™ (Abdeckfolie)	Klar, 10,2 cm x 15,2 cm, Packung zu 1200 Stück	13
3710/B	Cover-All™ (Abdeckfolie)	Blau, 10,2 cm x 15,2 cm, Packung zu 1200 Stück	13
DEMI-250	Pinnacle Complete Curing Light Sleeve	für Demi (250 Stück)	13
DEMIULTRA-100	Pinnacle Cure Sleeve	für Demi Ultra (100 Stück)	13
4500	Cure Sleeve® (Schutzhülle für Polymerisationslampen)	Für Spitzen von 7 und 8 mm, Packung zu 400 Stück	13
4511-1	Cure Sleeve® (Schutzhülle für Polymerisationslampen)	Für Spitzen von 11 mm, Packung zu 400 Stück	13
4513-1	Cure Sleeve® (Schutzhülle für Polymerisationslampen)	Für Spitzen von 13 mm, Packung zu 400 Stück	13
4000-1	HP Sleeve® (Schutzhülle für Handstücke)	HP Sleeve 3,13 cm x 25,4 cm, Packung zu 500 Stück	13
4050	HP Sleeve® (Schutzhülle für Handstücke)	HP Sleeve 5,1 cm x 25,4 cm, Packung zu 500 Stück	13
3511	Schonbezug für Kopfstütze	27,9 cm x 24,1 cm, Packung zu 250	13
3514	Schonbezug für Kopfstütze	35,6 cm x 24,1 cm, Packung zu 250	13
3650	Schutzhülle für Lampe, „L“-Form	3,8 cm x 20,3 cm, Packung zu 500 Stück	13
3600	Schutzhülle für Lampe, „T“-Form	10,2 cm x 14,6 cm, Packung zu 500 Stück	13
3850/XL	No-Slip Chair Sleeve™ (Rutschfester Stuhlbezug)	Chair Sleeve XL 73,7 cm x 203 cm, Packung zu 125 Stück	13
3870/NS	No-Slip Chair Sleeve™ (Rutschfester Stuhlbezug)	No-Slip Chair Sleeve 122 cm x 142 cm, Packung zu 150 Stück	13
3760	Syringe Sleeve™ (Schutzhülle für Spritze)	6,4 cm x 25,4 cm, Packung zu 500 Stück, Einweg-Schutzhülle für Drei-Wege-Spritze, HVE und Speichelabsaugung	13
3763/WA	Syringe Sleeve WA (selbsthaftend)	6,4 cm x 25,4 cm, Packung zu 500 Stück	13
3767/WO	Syringe Sleeve WO (mit Öffnung)	6,4 cm x 25,4 cm, Packung zu 500 Stück, exklusive, vorgeschnittene Öffnung für ein einfaches Aufziehen	13
4575	Augenschutz	Packung zu 400 Stück	13
3900	Schutzhülle für Röntgengerät	37,5 cm x 65 cm, Packung zu 250 Stück	13
PE77021/A	Seal-Tight® Adapter	A (Adec styles); 1 Stück	14
PE77024/P	Seal-Tight® Adapter	P (Standard Typ Adapter – Screw-in); 1 Stück	14
PE77200	Seal-Tight® (Einwegspitzen für Luft-/Wasserspritzen)	Seal-Tight Spender mit 200 Spitzen weiss	14
PE72200	Seal-Tight® (Einwegspitzen für Luft-/Wasserspritzen)	Seal-Tight Spender mit 200 Spitzen diverse Farben	14
PE77033/C	Seal-Tight® Adapter	Seal-Tight Adapter Snap-on für Cefla/Anthos; 1 Stück	14
PE77031/K	Seal-Tight® Adapter	Seal-Tight Adapter für KaVo 773.000 Light Syringe; 1 Stück	14
PE77034/K	Seal-Tight® Adapter	Seal-Tight Adapter für Kavo E30 Syringe; 1 Stück	14
PE77027/L	Seal-Tight® Adapter	Seal-Tight Adapter für Luzzani; 1 Stück	14
PE77030/S	Seal-Tight® Adapter	Seal-Tight Adapter Snap-on für Sirona Sprayvit L; 1 Stück	14

PATIENTEN-VORBEREITUNG			
REF	PRODUKTBESCHREIBUNG	INHALT	SEITE
5501	OptiView Nachfüllpackung	OptiView Lippenpolster (10 Lippenpolster)	19
5502	OptiView Small Assorted Kit	2 Small Lippen- und Wangenhalter mit montierten Lippenpolstern	19
5500	OptiView Standard Assorted Kit	2 Standard Lippen- und Wangenhalter mit montierten Lippenpolstern	19
PE2000/A	Bib-Eze™ Einweg-Serviettenhalter	Packung 250 Stück	17

UNTERSUCHUNG/ DIAGNOSE			
REF	PRODUKTBESCHREIBUNG	INHALT	SEITE
1721	Röntgen-Zentrierringe	Nachfüllpackung zu 3 Stück	21
1781	Kwik-Bite Zentrierhilfen	Nachfüllpackungen zu 50 Stück	21
1793	Endo-Bite Anterior Zentrierhilfen	Nachfüllpackungen zu 50 Stück	21
1794	Endo-Bite Posterior Zentrierhilfen	Nachfüllpackungen zu 50 Stück	21
1023	Super-Bite Anterior Zentrierhilfen	Nachfüllpackungen zu 50 Stück	21
1024	Super-Bite Posterior Zentrierhilfen	Nachfüllpackungen zu 50 Stück	21
270	Kwik-Bite mit Index	15 Kwik-Bite mit Index	21
670	Super-Bite mit Index	4 Super-Bite Anterior, 4 Super-Bite Posterior, 8 Index	21
671	Super-Bite mit Index Anterior - Nachfüllpackung	8 Super-Bite Anterior, 8 Index	21
672	Super-Bite mit Index Posterior - Nachfüllpackung	8 Super-Bite Posterior, 8 Index	21
1020	Super-Bite mit Ring - Sortiment	2 Super-Bite mit Ring Anterior, 2 Super-Bite mit Ring Posterior, 2 Zentrierhilfen	21
1021	Super-Bite mit Ring Anterior - Nachfüllpackungen	4 Super-Bite Anterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe	21
1022	Super-Bite mit Ring Posterior - Nachfüllpackungen	4 Super-Bite Posterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe	21
1770	Paro-Bite mit Ring	5 Paro-Bite mit Ring, 1 Zentrierhilfe	21
1780	Kwik-Bite mit Ring	5 Kwik-Bite mit Ring, 1 Zentrierhilfe	21
1790	Endo-Bite mit Ring - Sortiment	2 Endo-Bites Anterior mit Ringen, 2 Endo-Bites Posterior mit Ringen, 2 Zentrierhilfen	21
1791	Endo-Bite mit Ring Anterior - Nachfüllpackungen	4 Endo-Bite Anterior mit Ringen, 1 Zentrierhilfe	21
1792	Endo-Bite mit Ring Posterior - Nachfüllpackungen	4 Endo-Bite Posterior mit Ringen, 1 Zentrierhilfe	21
2700	Kwik-Bite Senso Standard Kit	4 Kwik-Bite Senso mit Ring, 1 Zentriervorrichtung	21
2800	Super-Bite Senso Assorted Kit	2 Super-Bite Senso Anterior mit Ring, 2 Super-Bite Senso Posterior mit Ring, 2 Zentrierhilfen	21
2801	Super-Bite Senso Anterior - Nachfüllpackung	4 Super-Bite Senso Anterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe	21
2802	Super-Bite Senso Posterior - Nachfüllpackung	4 Super-Bite Senso Posterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe	21
2900	Endo-Bite SensoAssorted Kit	2 Endo-Bite Senso Anterior mit Ring, 2 Endo-Bite Senso Posterior mit Ring, 2 Zentrierhilfen	21
2901	Endo-Bite Senso Anterior - Nachfüllpackung	4 Endo-Bite Senso Anterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe	21
2902	Endo-Bite Senso Posterior - Nachfüllpackung	4 Endo-Bite Senso Posterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe	21
3735	Sensor-Schutzhüllen	3,5 cm x 20,5 cm, Packung zu 500 Stück, für Trophy und Gendex®-Systeme	21
3736	Sensor-Schutzhüllen	4 cm x 21 cm, Packung zu 500 Stück, für Trophy und Gendex®-Systeme	21
2720	Sensorhalter Testset	5 Sensorhalter mit Ring (1 Kwik-Bite Senso, 1 Super-Bite Senso Anterior, 1 Super-Bite Senso Posterior, 1 Endo-Bite Senso Anterior, 1 Endo-Bite Senso Posterior), 5 Zentrierhilfen	21
1720	Röntgenfilm- und Speicherfolienhalter Testset	6 Filmhalter mit Ring (1 Kwik-Bite, 1 Super-Bite Anterior, 1 Super-Bite Posterior, 1 Paro-Bite, 1 Endo-Bite Anterior, 1 Endo-Bite Posterior, 6 Zentrierhilfen)	21

PROPHYLAXE-SITZUNG			
REF	PRODUKTBESCHREIBUNG	INHALT	SEITE
360	Cleanpolish, fluoridfrei, mit Anis-Geschmack	50 g Paste	23
361	Superpolish, fluoridfrei, mit Anis-Geschmack	45 g Paste	23
3151	Prophy-Clips, autoklavierbar bis 134 °C, für mindestens 3 Min.	Packung zu 6 Stück	23
3310	Cleanic Patrone mit Fluorid (0,15 % CaF)	Cleanic Nachfüllpackungen 200 g	26
3330	Cleanic Patrone mit Fluorid (0,15 % CaF)	Cleanic Nachfüllpackungen 100 g	26

3340	Cleanic Single Dose mit Fluorid, mit Fluorid 0,10 % (NaF)	200 Prophy-Paste Einzelportionen zu 2 g, 3 Ringtöpfe.	27
3380	Cleanic in der Tube Mint, mit Fluorid (0,10 % NaF), Minzgeschmack	Tube zu 100 g Prophylaxepaste	25
3382	Cleanic in der Tube Green Apple, mit Fluorid (0,10 % NaF), Green Apple-Geschmack, ohne Menthol	Tube zu 100 g Prophylaxepaste	25
3183	Cleanic in der Tube Mint ohne Fluorid, ohne Fluorid, Minzgeschmack	Tube zu 100 g Prophylaxepaste	25
3386	Cleanic in der Tube Berry Burst, mit Fluorid (0,10 % NaF), Berry Geschmack	Tube zu 100 g Prophylaxepaste	25
3384	Cleanic in der Tube Light, mit Fluorid (0,10 % NaF), ohne Aromastoffe und Farbstoffe	Tube zu 100 g Prophylaxepaste, künstliche	25
3210	Cleanic Patrone ohne Fluorid	Cleanic Nachfüllpackungen 200 g	26
3230	Cleanic Patrone ohne Fluorid	Cleanic Nachfüllpackungen 100 g	26
985	Ringtöpfe, nicht autoklavierbar	Packung zu 100 Stück	27
986	Assorted Kit Ringtöpfe, nicht autoklavierbar	Packung zu 100 Stück (20x Blau, 20x Grün, 20 x Grau, 20x Rosa, 20 x Gelb)	27
835 RA	Nylonborsten für Winkelstück	Packung zu 10 Stück	29
835/100	Nylonborsten für Winkelstück	Packung zu 100 Stück	29
845 RA	Nylonborsten für Winkelstück	Packung zu 10 Stück	29
845/100	Nylonborsten für Winkelstück	Packung zu 100 Stück	29
9000/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, gerippt Türkis	Packung zu 30 Stück	30
9000/120	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, gerippt Türkis	Packung zu 120 Stück	30
9001/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, lamellenförmig Hellgrau	Packung zu 30 Stück	30
9001/120	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, lamellenförmig Hellgrau	Packung zu 120 Stück	30
976	Snap-On Mandrells	3 Mandrells	30
976/10	Snap-On Mandrells	10 Mandrells	30
1301	Screw-Type Mandrells	10 Mandrells	30
9002/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Hartes Gummi, lamellenförmig Dunkelgrau	Packung zu 30 Stück	30
9002/120	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Hartes Gummi, lamellenförmig Dunkelgrau	Packung zu 120 Stück	30
9003/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, spitz Türkis	Packung zu 30 Stück	30
9003/120	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, spitz Türkis	Packung zu 120 Stück	30
9004/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, spiralförmig Violett	Packung zu 30 Stück	30
9004/120	EINWEG-PROPHY CUPS - Screw - Weiches Gummi, spiralförmig Violett	Packung zu 120 Stück	30
9006/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch - Weiches Gummi, lamellenförmig, Hellgrün	Packung zu 30 Stück	30
9006/120	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch - Weiches Gummi, lamellenförmig, Hellgrün	Packung zu 120 Stück	30
9011/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch - Hartes Gummi, lamellenförmig Waldgrün	Packung zu 30 Stück	30
9011/120	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch - Hartes Gummi, lamellenförmig Waldgrün	Packung zu 120 Stück	30
9007/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch - Weiches Gummi, lamellenförmig Pink	Packung zu 30 Stück	30
9008/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch - Hartes Gummi, gerippt Magenta	Packung zu 30 Stück	30
9009/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Latch mit Nylonborsten - Hartes Gummi Weiß	Packung zu 30 Stück	30
9005/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Snap On - Weiches Gummi, lamellenförmig. Ocker	Packung zu 30 Stück	30
9005/120	EINWEG-PROPHY CUPS - Snap On - Weiches Gummi, lamellenförmig. Ocker	Packung zu 120 Stück	30
9010/30	EINWEG-PROPHY CUPS - Snap On - Hartes Gummi, lamellenförmig. Orange	Packung zu 30 Stück	30
9010/120	EINWEG-PROPHY CUPS - Snap On - Hartes Gummi, lamellenförmig. Orange	Packung zu 120 Stück	30
1810/120	Pro-Cup weich, hellblau - Screw-Type	Packung zu 120 Stück	31
1810/30	Pro-Cup weich, hellblau - Screw Type	Packung zu 30 Stück	31
1811/120	Pro-Cup hart, dunkelblau - Screw-Type	Packung zu 120 Stück	31
1811/30	Pro-Cup hart, dunkelblau - Screw-Type	Packung zu 30 Stück	31

1812/120	Pro-Cup Junior weich, hellblau - Screw Type	Packung zu 120 Stück	31
1812/30	Pro-Cup Junior weich, hellblau - Screw Type	Packung zu 30 Stück	31
1813/30	Pro-Cup Junior hart, dunkelblau - Screw Type	Packung zu 30 Stück	31
990/120	Pro-Cup weich, hellblau - Latch-Type	Packung zu 120 Stück	31
990/30	Pro-Cup weich, hellblau - Latch-Type	Packung zu 30 Stück	31
991/120	Pro-Cup hart, dunkelblau - Latch-Type	Packung zu 120 Stück	31
991/30	Pro-Cup hart, dunkelblau - Latch-Type	Packung zu 30 Stück	31
992/120	Pro-Cup Junior weich, hellblau - Latch Type	Packung zu 120 Stück	31
992/30	Pro-Cup Junior weich, hellblau - Latch Type	Packung zu 30 Stück	31
993/120	Pro-Cup Junior hart, dunkelblau - Latch Type	Packung zu 30 Stück	31
993/30	Pro-Cup Junior hart, dunkelblau - Latch Type	Packung zu 30 Stück	31

0502	Irrigation Probe (Spülnadeln)	Gauge Nr. 21, Ø 0,8 mm, grün (0,8 mm x 25 mm), Packung zu 40 Stück	35
0503	Irrigation Probe (Spülnadeln)	Gauge Nr. 23, Ø 0,6 mm, blau (0,6 mm x 25 mm), Packung zu 40 Stück	35
0504	Irrigation Probe (Spülnadeln)	Gauge Nr. 25, Ø 0,5 mm, orange (0,5 mm x 25 mm), Packung zu 40 Stück	35
0505	Irrigation Probe (Spülnadeln)	Gauge Nr. 30, Ø 0,3 mm, gelb (0,3 mm x 25mm), Packung zu 40 Stück	35

IMPLANT CARE


REF	PRODUKTBESCHREIBUNG	INHALT	SEITE
1350	Universal Implant Deplaquer	Packung zu 5 Stück	33
1351	Universal Implant Deplaquer	Packung zu 2 Stück	33
3500	Paste für Implantate	Tube zu 45 g Implantat-Paste, ohne Fluorid und Minzgeschmack	34

MOTIVATION & RECALL

REF	PRODUKTBESCHREIBUNG	INHALT	SEITE
3400 WE	Cleanicdent	Tube 40 ml	39
8551	PlakACT Gel	0.2%, 20 x 5g	39
8553	PlakACT Mundspülung	0.1%, Flasche 250cc	39
8550	PlakACT Gel	0.2%, 33g	39
8560	PlakACT Spray	0.1%, Sprayflasche 50cc	39
3500	Paste für Implantate	Tube zu 45 g Implantat-Paste, ohne Fluorid und Minzgeschmack	39

ARBEITSPLATZ REINIGEN

REF	PRODUKTBESCHREIBUNG	INHALT	SEITE
4731221/15	CaviCide 200 ml	200 ml x 15	41
4731222/15	CaviCide 700 ml	700 ml x 15	41
4731223	CaviCide 5 l	5 l	41
4731229	Pumpe für 5 l CaviCide		41
4731160	CaviWipes - Kanister, Tuchgrösse 15.24 x 17.15 cm	12 Packungen x 160 getränkte Tücher,	43
4731065	CaviWipes XL, Kanister, Tuchgrösse 22.9 x 30.5 cm	12 Packungen x 65 getränkte Tücher	43
4731245	CaviWipes, Flat Pack, Tuchgrösse 17.5 x 22.5 cm	20 Flat Packs x 45 getränkte Tücher	43

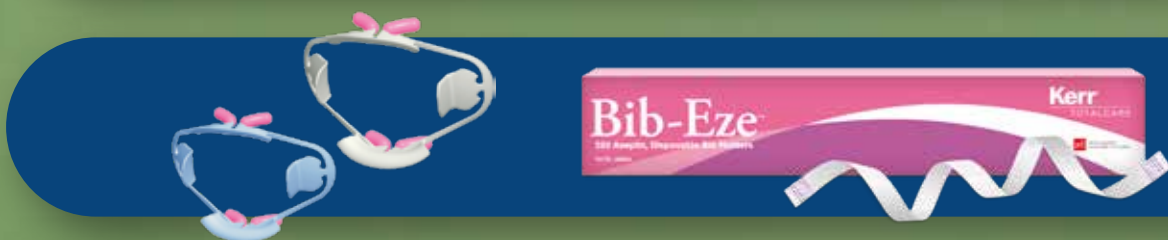

MKT-22-0049-DE

Folgen Sie uns auf



Kerr GmbH | Konrad-Zuse-Straße 6 | 52134 Herzogenrath | Deutschland
Nobel Biocare Services AG | Balz-Zimmermann-Strasse 7 | 8302 Kloten | Schweiz
www.kerrdental.com

Kerr™