



Maxcem Elite™ und Maxcem Elite™ Chroma Universal Kompositzement

Ein Zement für all Ihre Ansprüche.

Universelle Stärke und Einfachheit.

Vereinfachen Sie Ihre Materiallagerhaltung und wenden Sie weiterhin Ihre bevorzugte Zementierungstechnik mit Maxcem Elite und Maxcem Elite Chroma Universal Kompositzement an. Der einzige Zement, den Sie benötigen, um alle Ihre Anforderungen an indirekte Restaurationen zu erfüllen. Er bietet universelle Vielseitigkeit, höhere Haftfestigkeit, vorhersehbare Handhabung und außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit.

Features & Benefits



Das Beste aus beiden Welten

Genießen Sie die Einfachheit eines selbstadhäsiven Zements und das Vertrauen eines adhäsiven Kompositzements, wenn er mit einem universellen Haftvermittler verwendet wird. Maxcem Elite und Maxcem Elite Chroma Universal Kompositzement bieten eine hervorragende Befestigung für indirekte Restaurationen im selbsthärtenden, lighthärtenden oder dualhärtenden Modus.



Universelle Kompatibilität

Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit einem Zement für all Ihre Anforderungen. Maxcem Elite und Maxcem Elite Chroma Universal Kompositzement sind mit allen dentalen Substraten und indirekten Restaurationen kompatibel, einschließlich Front- oder Seitenzahnkeramiken, Metallkeramikronen und Metallrestaurationen sowie CAD/CAM-Materialien.



Verstärken Sie die Haftfestigkeit

Als selbstätzender/selbstadhäsiver Zement bietet Maxcem Elite Universal Kompositzement sichereren Halt im Vergleich zu anderen führenden selbstadhäsiven Zementen auf dem Markt sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen.



Smart und einfach

One-peel™-Versäuberung vereinfacht Ihren Arbeitsablauf noch mehr. Darüber hinaus wird Maxcem Elite Chroma Universal Kompositzement rosa eingebracht, bevor es im Gelzustand verblasst - was den optimalen Zeitpunkt zum Entfernen von überschüssigem Zement anzeigt. Ohne Handanmischung, ohne Kühlung und ohne Rätselfragen genießen Sie jedes Mal eine einfachere und konsistente Versäuberung.

Die ultimative Power-Combo

Für Restaurationen, die noch mehr Festigkeit erfordern, bietet Maxcem Elite Universal Kompositzement in Kombination mit OptiBond Universal eine hervorragende Haftungskompatibilität mit einer breiten Palette von Dentalsubstraten für alle* indirekten Verfahren. Diese Power-Kombination sorgt durch eine hohe Festigkeit für noch sicherere Ergebnisse.

Da bei der Kombination mit OptiBond Universal keine Lighthärtung erforderlich ist, können Sie Ihr Protokoll vereinfachen und gleichzeitig Ihre Haftfestigkeit erhöhen.






EIN ZEMENT FÜR ALL IHRE BEDÜRFNISSE

Verwenden Sie Maxcem Elite Universal Kompositzement als selbstadhäsiven Zement oder kombinieren Sie ihn mit jedem Universal-Adhäsivsystem wie OptiBond™ Universal auf Präparationen, die mehr Retention benötigen.

Langlebige Ästhetik

Maxcem Elite und Maxcem Elite Chroma Universal Kompositzemente bieten lang anhaltende Farbstabilität und außergewöhnliche Ästhetik. Mit einem patentierten und bewährten Redox-Initiatorsystem, welches auch in NX3 Nexus™ verwendet wird, sind Farbverschiebungen im Laufe der Zeit praktisch nicht wahrnehmbar.

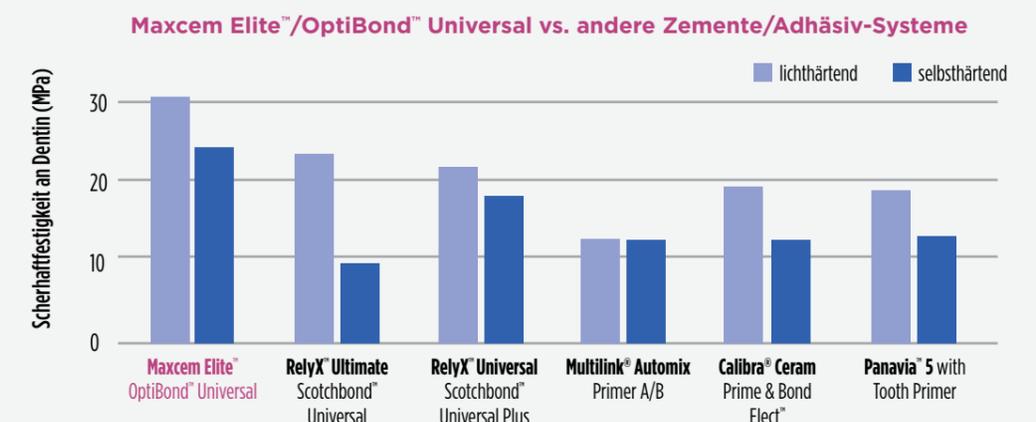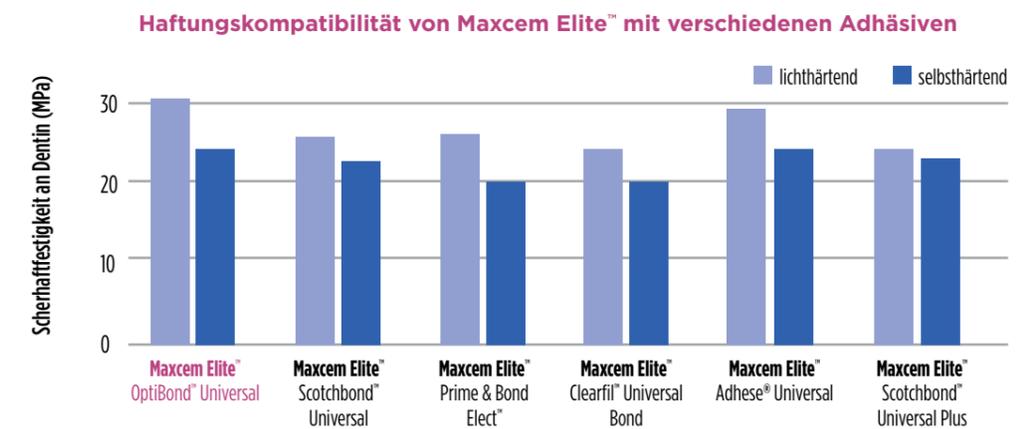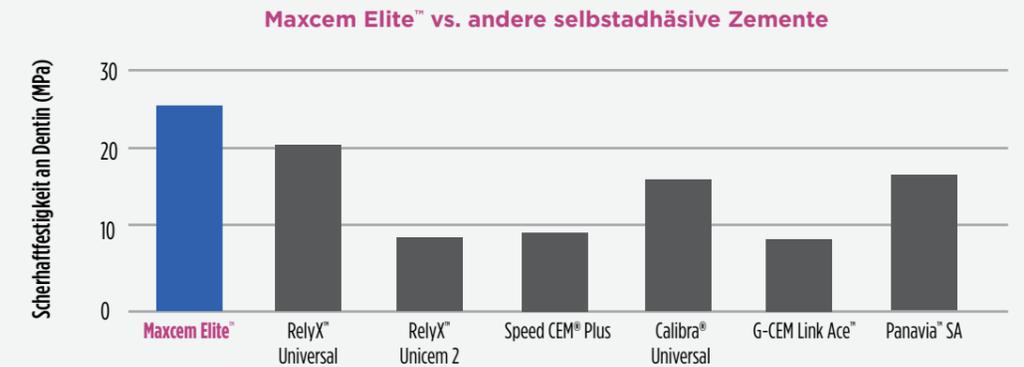

MAXCEM ELITE™ CHROMA

DER ERSTE ZEMENT, DER IHNEN SAGT, WANN ES ZEIT IST, ZU VERSÄUBERN.



Als erster selbstätzender/selbstadhäsiver Kompositzement, der einen **Versäuberungs-Farbindikator** bietet, ist Maxcem Elite Chroma einer der intelligentesten Zemente, der heute auf dem Markt erhältlich ist.

Die rosa Farbe verschwindet beim Gelzustand und zeigt Ihnen so das optimale Zeitfenster für die Entfernung von Zementüberschüssen an.



Setzen Sie die Restauration ein und halten Sie sie mit mäßigem Druck fest. Lassen Sie den Zement aus allen Rändern abfließen.



Während er aushärtet, ändert sich die Zementfarbe von rosa zu weiß. Bei der Zementfarbe Gelb ändert sich die Farbe von rosa zu elfenbeinfarben.

Wenn die rosa Farbe verblasst ist, entfernen Sie die Zementüberschüsse unter Aufrechterhaltung des Drucks auf die Restauration.

Bestellinformationen

Maxcem Elite™ Universal Kompositzement

34055	Maxcem Elite Standard Kit
34056	Maxcem Elite Value Kit
34057	Maxcem Elite Mini Kit
34058	Maxcem Elite Refill Clear
34059	Maxcem Elite Refill White
34060	Maxcem Elite Refill White Opaque
34061	Maxcem Elite Refill Yellow
34074	Maxcem Elite Mixing tips
34075	Maxcem Elite Intra-oral tips + Mixing tips (wide)
34076	Maxcem Elite Root-canal tips + Mixing tips (wide)

Maxcem Elite™ Chroma Universal Kompositzement

36371	Maxcem Elite Chroma - Standard Kit
36372	Maxcem Elite Chroma - Refill, clear
36373	Maxcem Elite Chroma - Refill, white
36374	Maxcem Elite Chroma - Refill, yellow
36375	Maxcem Elite Chroma - Mixing tips, regular
36376	Maxcem Elite Chroma - Mixing tips, wide + root canal tips
36377	Maxcem Elite Chroma - Mixing tips, wide + intra-oral tips

OptiBond™ Universal

36517	OptiBond Universal Bottle Kit
36518	OptiBond Universal Unidose Kit
36519	OptiBond Universal Bottle Refill
34632	Gel Etchant Jumbo Sparpackung
26909	Gel Etchant Sparpackung 30 x Entnahmespitzen
31297	Gel Etchant Packung 3x 3g Spritze

Daten auf Anfrage verfügbar. Maxcem Elite ist eine Marke der Kerr Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Folgen Sie uns auf



Kerr GmbH | Konrad-Zuse-Straße 6 | 52134 Herzogenrath | Deutschland
Nobel Biocare Services AG | Balz-Zimmermann-Strasse 7 | 8302 Kloten | Schweiz
www.kerrdental.com
MKT-22-0085

Kerr™
RESTORATIVES